


Alma
For You. For Life.



Alma PrimeX

Для всіх вас

**Повний спектр процедур
для тіла і обличчя**



Неперевершений досвід для всього тіла

Кожен елемент і характерна особливість «Alma PrimeX™» були ретельно продумані і сплановані для того, щоб забезпечити отримання Вами і вашими пацієнтами неперевершеного досвіду лікування всього тіла.

Будучи повністю неінвазивною, «Alma PrimeX» є платформою для тіла та обличчя, з якою досягаються неперевершені результати

Чому «Alma PrimeX»?

Одна платформа, 12 аплікаторів для лікування всього тіла і обличчя

Підберіть коректну процедуру відповідно до потреб та очікувань кожного пацієнта

Розширені можливості ультразвукового та високочастотного впливу

Синергетичні особливості для неперевершених результатів

Відмінні довготривалі результати лікування

2 основні технології в потужному поєднанні

Для досягнення більш швидких і довготривалих результатів в «Alma PrimeX» використовуються дві технології синергетики

US

Ультразвук

Запатентовані спрямовані ультразвукові хвилі «Alma» впливають на жирову тканину, що призводить до зменшення її обсягу, про що свідчать неперевершені клінічні результати.

RF

Радіочастота

«UniPolar RF Energy» ефективно прогріває шкірні прошарки, впливаючи на колагенові та еластинові волокна, активуючи фібробласти та сприяючи утворенню нового колагену. Унікальна технологія 40,68 МГц хвилі «Alma» сприяє глибокому однорідному прогріванню для досягнення видимих довготривалих результатів підтяжки.

«Alma»
ХВИЛЯ



40.68

МГц
ТЕХНОЛОГІЯ





Процедури для будь-якого тіла

Поєднання технологій в «Alma PrimeX» надає можливість проводити різноманітні процедури для тіла з використанням єдиної платформи: ультразвук працює для зменшення окружностей, впливаючи на надлишкові жирові відкладення в руках, ногах, стегнах, сідницях, боках і животі, а радіочастота лікує розтяжки, підтягує слабку шкіру і покращує лімфодренаж для зниження ймовірності появи целюліту.



Аплікатори для тіла



«UltraWave»

Високошвидкісна контурна пластика тіла

«UltraWave» поєднує в собі технологію несфокусованого пучка ультразвукових хвиль та дуже велику пластину аплікатора для спрямування дії і зменшення об'єму жирової тканини. Чотири революційні функції забезпечують неймовірні результати: «ConeX» посилює акустичні хвилі, зменшуючи відбиття ультразвукових хвиль. «Impulse» доставляє ультразвукові імпульси для того, щоб зробити процедуру більш ефективною. «Maximize» використовує вакуум для підтримки безперервного контакту аплікатора зі шкірою, для максимальної однорідної доставки ультразвукових хвиль. «ReACT» контролює вихід енергії відповідно до характеристик тканини, на яку здійснюється вплив, що надає можливість систематичної оптимізації.



«UniBody»

Контурна пластика тіла, підтяжка
і боротьба з целюлітом

Поєднуючи технологію «UniPolar RF» зі змінною обертовою масажною головкою, цей аплікатор забезпечує прогрівання шкіри на чотирьох різних глибинах в дермі, викликаючи ремоделювання колагену.



«Xcentuate»

Контурна пластика тіла на великих ділянках

«Xcentuate» доставляє радіочастотну енергію за допомогою двох незалежних безконтактних аплікаторів з регулюванням температури, і механізму охолодження, який видаляє тепло з поверхні шкіри.

Підтяжка обличчя для того, щоб виглядати по-новому

В «Alma PrimeX» радіочастотна енергія використовується для підтяжки та ліфтингу, згладжування ліній і зморшок, підтяжки шкіри та вирівнювання текстури шкіри. Ультразвук використовується для впливу на зайві жирові відкладення, створюючи оптимальне поєднання для кращого вигляду шкіри.

Аплікатори для обличчя




«Microplasma»

Комбінований підхід до шліфування шкіри

Будучи спроектованим «Alma» з використанням унікальної технології мікроплазми, цей аплікатор одночасно здійснює абляцію і прогрівання шкіри, досягаючи вражаючих результатів в шліфуванні шкіри, корекції рубців і видаленні розтяжок. РЧ енергія генерує іскри плазми, які створюють в шкірі мікроканали, разом з коагуляцією шкіри. Мікроперфорації знаходяться в оточенні неушкодженої шкіри, що сприяє регенерації тканин.

Додаткові поради

Рухомий

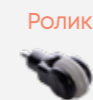

Ролик

Доступні 3 ролика з різною кількістю штифтів для різних енергетичних показників в залежності від показань для проведення процедури.

Зафіксований



Гостроконечник

Застосовується для сфокусованого, глибокого прогрівання шкіри, зокрема для лікування рубців і зморшок після вугрового висипання.



«MiniSpeed/SpeedSculpt»

Вплив на підшкірні жирові відкладення в ділянках супер малого розміру

Доставляючи в шкіру запатентовані нефокусовані ультразвукові хвилі для значного зменшення об'єму жирової тканини і контуру обличчя, сонотрод «MiniSpeed» діаметром 55 мм був спеціально розроблений для використання на невеликих ділянках, таких як задня частина рук. В «SpeedSculpt», який є версією «MiniSpeed» з мікро-розміром, використовується сонотрод діаметром 40 мм, що забезпечує ефективний та безпечний вплив на жирові відкладення в ділянках супер малого розміру, таких як ямка на підборідді.



«UniLarge»

Підтяжка шкіри на обличчі та тілі

В «UniLarge» енергія «UniPolar RF» використовується для глибокого прогрівання шкіри і стимуляції утворення нового колагену. Аплікатор оснащений інфрачервоним термометром для забезпечення комфортної температури шкіри. Доступні декілька глибин проникнення тепла для різної товщини шкіри і ділянок тіла.

Аплікатори для обличчя



«Impact»

Покращення абсорбції косметичних засобів

Цей аплікатор для трансепідермальної доставки може використовуватися окремо або після процедури шліфування, такої як мікроплазмова обробка. Унікальна запатентована технологія «Alma» для доставки низькочастотних несфокусованих ультразвукових хвиль створює акустичний тиск, який проходить крізь внутрішньоклітинну рідину в мікротермічних зонах, покращуючи проникнення косметичних засобів в тканини.



«UniFace»

Підтяжка обличчя і зменшення дряблості шкіри

Поєднання в цьому аплікаторі технології «UniPolar RF» зі знімним обертовим масажним кільцем забезпечує глибоке прогрівання шкіри, одночасно збільшуючи циркуляцію всередині дерми, підтягуючи шкіру та зменшуючи дряблість, зморшки і глибокі зморшки на шкірі обличчя.



«Coaxipolar»

Вражаюча контурна пластика та підтяжка

Використання в цьому аплікаторі клінічно перевіреної технології біполярних радіочастотних хвиль забезпечує ефективне, локальне, поверхневе прогрівання шкіри в тонких і кісткових ділянках, стимулюючи синтез нового колагену. Вбудований інфрачервоний термометр дозволяє в режимі реального часу контролювати температуру шкіри для комфортного лікування.



«TuneFace»

Підтяжка невеликих ділянок

Цей аплікатор на основі технології радіочастотних хвиль був унікально розроблений для виконання стаціонарних процедур підтягування шкіри. Завдяки допоміжному вакуумному механізму, який сприяє більш глибокому проникненню, розмір робить «TuneFace» ідеальним для підтягування невеликих ділянок на обличчі.



«Tune Periorbital»

Видалення зморшок і усунення дряблості шкіри


Включаючи технологію на основі РЧ-вакууму, цей аплікатор був спеціально розроблений для лікування невеликих ділянок. Забезпечуючи об'ємне глибоке прогрівання тканин, він видаляє зморшки, а також глибокі зморшки, і усуває дряблість шкіри, зокрема навколо очей.



Поєднання в «Alma PrimeX» двох технологій забезпечило відмінні результати контурної пластики тіла і підтягування шкіри в дуже короткі терміни. Різні протоколи надають мені можливість лікувати кожного пацієнта відповідно до його конкретних потреб, фінансових можливостей і бажання отримати результати швидко. Це чудово для клініки, тому що нам є що запропонувати кожному пацієнту.




Доктор Інес Вернер, лікар-дерматолог, клініка «Вернер», Ізраїль

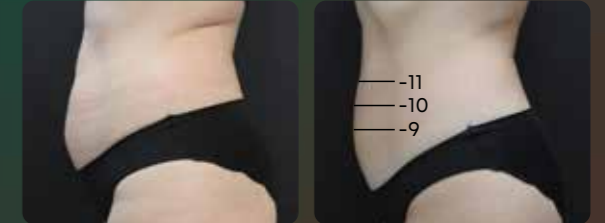

~5'a U 7`b]W`fl ~ <т



3 люб'язної згоди «Alma Clinic» (клініка «Альма»)

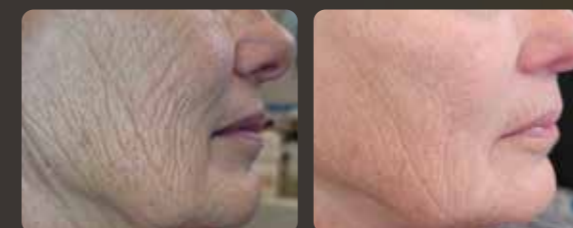

Після 3 процедур
3 люб'язної згоди доктора Кет Лофлі, доктор медичної практики, США



Після 4 процедур
3 люб'язної згоди «Alma Clinic» (клініка «Альма»)



Унікальна технологія поєднання ультразвукових і радіочастотних хвиль, а також широкий асортимент аплікаторів «Alma PrimeX», дозволяє мені створити процедуру для обличчя, яка точно підходить кожному клієнту. Виконуючи одну процедуру, я можу лікувати декілька проблем зі шкірою, включаючи текстуру, дряблість і тон, сприяючи молодому вигляду шкіри обличчя. Це дивовижна пропозиція для мене і моїх пацієнтів.



3 люб'язної згоди доктора Фернандо Урдіалеса, лікаря, директора медичного інституту «Мірамар», Іспанія



Alma PrimeX

For **All** of You

Зміни – це природний процес, але він не завжди йде так, як нам подобається. Саме тут з'являється технологія «Alma», яка повертає контроль в наші руки.

Будучи лідерами в сфері медичної естетики, ми надаємо тисячам лікарів можливість допомогти мільйонам пацієнтів пережити по-справжньому неймовірні перетворення.

«Alma» надає можливість виконання максимально ефективною, швидкої і безпечною процедури для кожного пацієнта. А для Вас ми пропонуємо наш клінічний досвід, спеціальну сервісну і маркетингову підтримку, а також інноваційні технологічні розробки для того, щоб створити комплексну систему підтримки, яка приносить вам користь.

У світі, який постійно змінюється, одна річ залишається незмінною: пацієнти повинні знати, що вони отримують найкращий догляд до, під час і після виконання процедури. Наші рішення в ваших руках роблять це можливим.

«Alma Lasers GmbH»
(Альма Лазерс ГмбХ)

Нордостпарк 100-102
90411, Нюрнберг, Німеччина
Тел.: + 49 911 / 89 11 29-0
Факс: + 49 911 / 89 11 29-99

Ел. пошта: info@almalasers.com

www.almalasers.com

© 2023 Alma. Всі права захищені.

«Alma», логотип «Alma», «Alma PrimeX», «AlmaWave», «Impact», «Microplasma», «TuneFace», «UltraWave», «Unipolar» і «Xcentuate» є торговими марками або зареєстрованими торговими марками «Alma» в США та/або інших країнах.

* Патенти США: www.almainc.com/patents

З'ЯЖІТЬСЯ З «ALMA»



PВAP01012301_01